

長庚紀念醫院 高雄院區 麻醉部門

適用對象(麻醉科系技術師、技術員)

< 麻醉 999 箱設備 > 工作規範

編號：AUNQ01-000+B00

2013 年 05 月 10 日 制訂公佈

2023 年 08 月 20 日 第 8 次 修訂

使 用 規 定

- 一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。
- 二、倘若對所訂內容有疑問，應即向直屬主管請教，務必求得徹底瞭解為止。
- 三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，使內容更為完整。

目 錄

壹、工作職責	8
1	
貳、操作標準	8
2	
參、異常狀況及處理對策	8
8	

壹、工作職責

編號：AUNQ01-000+B00

頁數：8-1

總頁數：8

一、工作目的

本設備標準儀器工作規範，提供麻醉**技術師**、**技術員**有正確標準儀器操作程序，以確保參與 999 急救作業時，能確保病人之生命安全，並藉由量化標準、制式規格，以供所有人員作為依據。

二、工作項目

麻醉 999 箱擺設。

貳、操作標準

編號：AUNQ01-000+B00

頁數：8-2

總頁數：8

項目	細目	管制基準	操作說明		注意事項		異常處理
壹、 麻醉 999 箱設定	一、999 箱內設 置： (一)插管用具 (二)oral&nasal airway、suction tube 14Fr. (三)6.5、7.5Fr. Endo (四)急救藥物 (五)新增公共區域 插管專用包，內 容物： 1. 透明防護面 2. N95 口罩 3. 防水隔離衣 4. 6.0~7.5 碼 手套 5. 75%乾洗手 酒精 6. 護目鏡	設定之基準，以第一時 間維持病人之呼吸道 通暢，及維持生理血循 之提升，已達急救之目 的，確保病人之生命安 全。	(1)麻醉科 999 箱之內部設定量如下：				A. 請注意有效日 期之監測，並 定期更換過期 之物品。 B. 若發現物品缺 料時，應追朔 是否為漏計價 或消耗品。 C. 每天點班時， 應測試喉頭鏡 之光度是否充 足。
			材料	數量	材料	數量	
			握柄	1	Oral airway90	2	
			喉鏡 0 直	1	Oral airway80	1	
			喉鏡 1 直	1	Oral airway60	1	
			喉鏡 2 直	1	Oral airway 43	1	
			喉鏡 3 直	1	Magill forceps	1	
			喉鏡 1 彎	1	stylet	4	
			喉鏡 2 彎	1	換管通條	2	
			喉鏡 3 彎	1	LMA4	1	
			6.5 號 Endo	1	LMA3	1	
			7.0 號 Endo	1	LMA2	1	
			7.5 號 Endo	1	Nasal airway 7.0-7.5Fr	1	
			Ambu	1	張口器	1	
		Mask	1				
				(2)請確實遵循點單原則，並登錄點班動作。			
				公佈日期：2013 年 05 月		修訂日期：2023 年 08 月第 8 次修訂	

貳、操作標準

編號：AUNQ01-000+B00

總頁數：8

頁數：8-3

項目	細目	管制基準	操作說明	注意事項	異常處理
貳、 必須定時 統一規範 全科用品 之清潔時 刻表		避免因外攜物品遭 感染之危害	<ol style="list-style-type: none"> 1. 由外攜入 999 箱後應 先行操作外箱之消毒工 作 2. 以 75%酒精噴灑外箱， 行消毒工作並等待外箱 乾燥。 3. 將外用之物品行替換 之動作，若為消耗性物 料則補充物料，若為重 消物品則交與消毒員行 高層次消毒，但是應先 行更換新物補入，不可 有空窗期。 	預防有空窗期之產生 應及時補充物料。	
參、 病人資料 登錄		登錄病人資料以做 統計追蹤	登錄病人資料以供 999 作業之統計分析	應注意病人隱私，將 資料小心存放。	
			公佈日期：2013 年 05 月	修訂日期：2023 年 08 月第 8 次修訂	

標準作業規範：依作業程序逐項敘述各細目作業之操作目的、作業適用範圍、使用器材(工具)、操作說明(或管制基準)、注意事項及異常處理對策。

(a)操作目的：敘述標準操作流程執行之基本精神。

(b)作業適用範圍：敘述作業所能涵蓋應用之業務範圍。

(c)使用器材：敘述作業執行時會應用之器材或工具。

(d)操作說明或作業流程：敘述操作或作業的標準程序、方法或設備操作、運轉、檢查的標準程序。

(e)注意事項：敘述各作業細目需注意之操作程序、方法及異常防範方法、作業安全、品質管制及設備預防保養等應注意事項。

麻醉 999 箱設備標準作業規範 (一)

編號：AUNQ01-000+B00

總頁數：8

頁數：8-4

作業目的	適用範圍	使 用 器 材、工 具			
		材料	數量	材料	數量
本設備標準儀器工作規範，提供麻醉護理專業人員有正確標準儀器操作程序，以確保參與 999 急救作業時，能確保 air way 維持通暢，病人之生命安全，並藉由量化標準、制式規格，以供所有人員作為依據。	全院呼叫 999 之作業範圍。	握柄	1	Oral airway90	2
		喉鏡 0 直	1	Oral airway80	1
		喉鏡 1 直	1	Oral airway60	1
		喉鏡 2 直	1	Oral airway 43	1
		喉鏡 3 直	1	Magill forceps	1
		喉鏡 1 彎	1	stylet	4
		喉鏡 2 彎	1	換管通條	2
		喉鏡 3 彎	1	LMA4	1
		6.5 號 Endo	1	LMA3	1
		7.0 號 Endo	1	LMA2	1
		7.5 號 Endo	1	Nasal airway 7.0-7.5Fr	1
		Ambu	1	張口器	1
				Mask	1
		公佈日期：2013 年 05 月		修訂日期：2023 年 08 月 8 次修訂	

麻醉 999 箱設備標準作業規範(二)

編號：AUNQ01-000+B00

總頁數：8

頁數：8-5

項次	操作說明或作業流程	注 意 事 項
<p>壹、麻醉 999 箱設定</p> <p>貳、必須定時統一規範全科用品之清潔時刻表</p> <p>參、病人資料登錄</p>	<p>一、工作車內設置插管工具。</p> <p>二、工作車內設置常備耗材。</p> <p>避免因外攜物品遭感染之危害。</p> <p>一、登錄病人資料以做統計追蹤。</p> <p>二、如有插管計價方式為 G11-047 (大人)、M32-043 (小兒)。</p> <p>三、如有使用耗材，立即補充。</p>	<p>(一)請依照麻醉科 999 箱之內部設定量並行點班動作。</p> <p>(二)請確實遵循點單原則，並登錄點班動作。</p> <p>(三)請注意有效日期之監測，並定期更換過期之物品。</p> <p>(四)若發現物品缺料時應追溯是否為漏計價或消耗品。</p> <p>(五)點班時應測試喉頭鏡之光度是否充足。</p> <p>(一)由外攜入 999 箱後應先行操作外箱之消毒工作。</p> <p>(二)以 75%酒精噴灑外箱.行消毒工作並等待外箱乾燥。</p> <p>(三)將外用之物品行替換之動作，若為消耗性物料，則補充物料，若為重消物品，則交與消毒員行高層次消毒，但是應先行更換新物補入，不可有空窗期。</p> <p>(一)登錄病人資料以供 999 作業之統計分析。</p> <p>(二)應注意病人隱私，將資料小心存放。</p> <p>(三)計價方式：請該單位發會診單至麻醉科，由麻醉科醫師回覆會診後，由請該單位書記批價。</p>
		<p>公佈日期：2013 年 05 月 修訂日期：2023 年 08 月 8 次修訂</p>

麻醉 999 箱設備標準作業規範(三)

編號：AUNQ01-000+B00

總頁數：8

頁數：8-6

異常狀況	發生原因	處理對策
一、999 箱損壞。 二、999 箱內物料不足。	(一)使用不當。 (二)使用年限過久。 使用後未及時補充或無點班。	1. 建立 999 箱使用工作規範。 2. 全面更新。 1. 每天點班 9AM 前完成。 2. 使用後依據使用量補充。

公佈日期：2013 年 05 月

修訂日期：2023 年 08 月 8 次修訂

麻醉 999 箱設備作業規範(四)

編號：AUNQ01-000+B00

總頁數：8

頁數：8-7

依據 102 年度規範修訂準則增設。

公佈日期：2013 年 05 月

修訂日期：2023 年 08 月 8 次修訂

參、異常狀況及處理對策

編號：AUNQ01-000+B00

總頁數：8

頁數：8-8

異常狀況	發生原因	處理對策
<p>一、999 箱損壞。</p> <p>二、999 箱內物料不足。</p>	<p>(一)使用不當。</p> <p>(二)使用年限過久。</p> <p>使用後未及時補充或無點班。</p>	<p>1. 建立 999 箱使用工作規範。</p> <p>2. 全面更新。</p> <p>1. 每天點班 9AM 前完成。</p> <p>2. 使用後依據使用量補充。</p>
<p>公佈日期：2013 年 05 月</p>		<p>修訂日期：2023 年 08 月第 8 次修訂</p>

高雄長庚麻醉部