

長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 麻醉科系

適用對象(麻醉技術師、員)

## 喉頭鏡葉片消毒標準作業規範

編號：AUNQ01-209

2010 年 06 月 01 日 制訂公佈

2022 年 08 月 30 日 第 10 次修訂

## 使 用 規 定

- 一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，並嚴格遵照執行。
- 二、倘若對所訂內容有疑問，應即向直屬主管請教，務必求得徹底瞭解為止。
- 三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主管並作充分溝通，俾使內容更為完整。

喉頭鏡葉片消毒標準作業規範(一)

編號 AUNQ01-209

作業目的	適用範圍	使用器材、工具					
		材料品名	消毒層次				
			無菌	高	中	低	清潔
一、杜絕感染源。 二、維持喉頭鏡、葉片正常功能。 三、以維繫麻醉中使用喉頭鏡葉片之安全及品質。	一、適用範圍： 任何需要使用喉頭鏡葉片的麻醉。 二、適用人員： 麻醉技術師、員	一、乳膠檢診手套					◎
		二、2*2 小紗					◎
		三、Cidex OPA			◎		
		四、酵素					◎
		五、蒸餾水					◎
		六、75%Alcohol					◎
		公佈日期：2010 年 06 月		修訂日期:2022 年 8 月 30 日第 10 次修訂			

## 喉頭鏡葉片消毒標準作業規範(二)

編號：AUNQ01-209

總頁數：4

頁數：4-2

項次	操作說明或作業流程	注意事項
壹	<p>一、執行：</p> <p>麻醉插管後</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 戴乳膠檢診手套</li> <li>2. 先在房間洗滌室用 2 * 2 小紗清水擦洗。</li> <li>3. 再將喉頭鏡送至洗滌室內的酵素桶，溶解黏沫分泌物。</li> <li>4. 擦乾後放入 CIDEX OPA 盒內泡消。</li> <li>5. 消毒後用 2 * 2 小紗在蒸餾水下刷洗。</li> <li>6. 刷洗後放在乾燥箱晾乾。</li> <li>7. 喉頭鏡柄以 75%酒精擦拭。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 將附著於葉片上之口水或黏膜擦拭掉。</li> <li>2. 泡酵素桶需先浸泡 10 分鐘後清水沖洗後擦乾。</li> <li>3. 葉片要完全浸泡於消毒溶液中 OPA 消毒時間 5 分鐘。</li> <li>4. CIDEX OPA 有效期限 14 天。(每次泡消前，需使用試紙測試 CIDEX OPA 是否維持在有效濃度以上)。</li> <li>5. 洗滌人員須穿上防護衣及防護面罩以防消毒液噴濺。</li> </ol> <p>口訣：內、外、夾、弓、大、力、完，歷時 30 秒。</p>
貳	<p>二、執行後</p> <p>以 AUNQ01-111 洗手法標準作業規範執行消毒性洗手。</p> <p>保養：</p> <p>喉頭鏡握柄、葉片不用時應分開，避免耗費電源及燈泡。</p>	
公佈日期： 2010 年 06 月		修訂日期:2022 年 8 月 30 日第 10 次修訂

## 喉頭鏡葉片消毒標準作業規範(三)

編號：AUNQ01-209

總頁數：4

頁數：4-3

異常狀況	發生原因	處理對策
喉頭鏡光源異常	一、電力不夠。 二、喉頭鏡燈泡損壞。 三、接觸不良。 四、葉片燈泡處有污垢	1. 更換電池。 2. 請修。 3. 將燈泡取出、檢查擦淨前端然後鎖緊。 4. 使用紗布沾取清水給予擦拭乾淨。
		公佈日期：2010年06月   修訂日期:2022年8月30日第10次修訂

喉頭鏡葉片消毒標準作業規範(四)

編號：AUNQ01-209

總頁數：4

頁數：4-4

- 一、呂學重 (83) 長庚紀念醫院感染管制手冊。
- 二、Alasdair Dow , Jerry Nolan (1994) Anesthesia and Critical care

公佈日期： 2010 年 06 月 修訂日期:2022 年 8 月 30 日第 10 次修訂